




Att välja plagg


Rekommendationer för olika ingrepp

FETTSUGNING

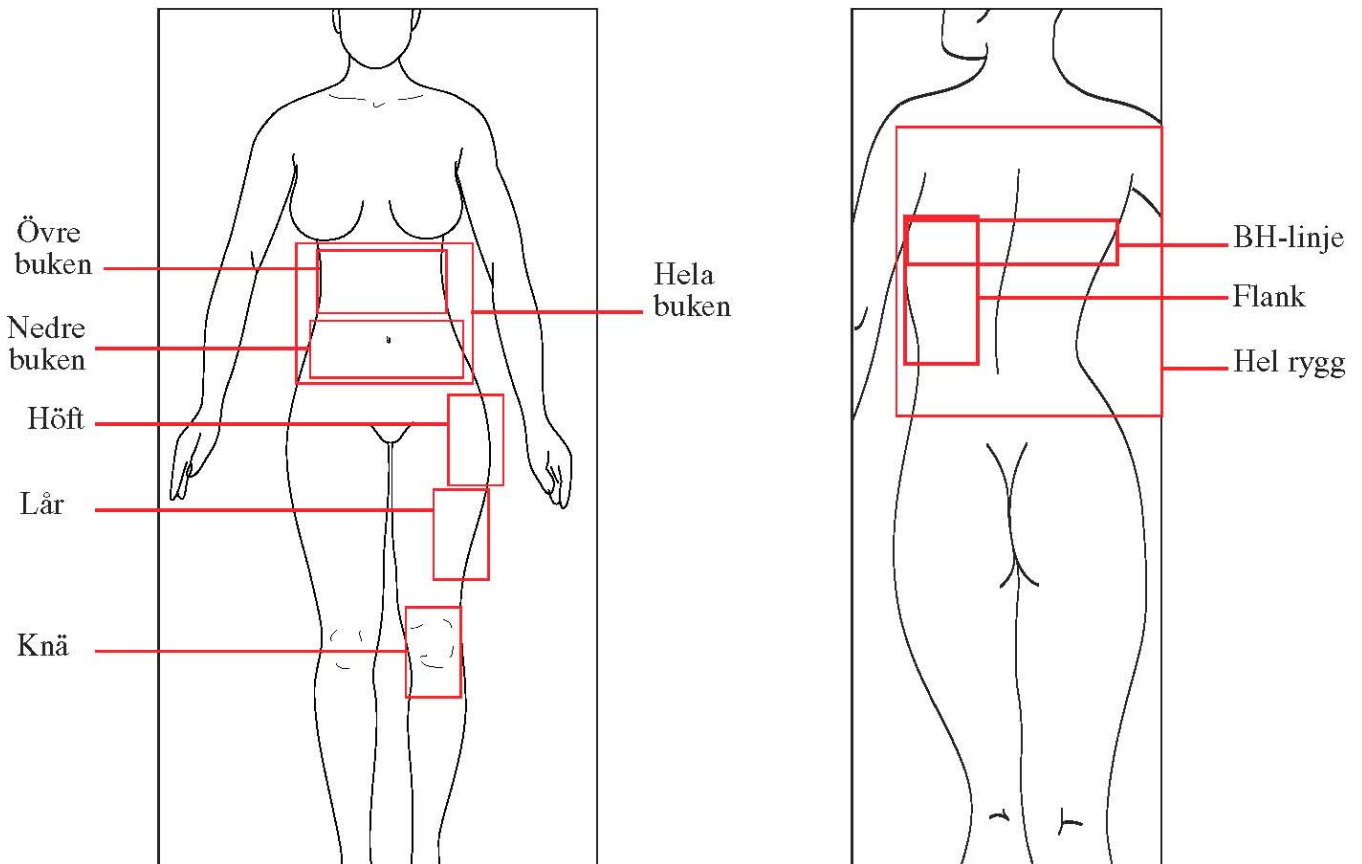

Område:	1'a val	Alternativ	
Nedre buken	#75	#85	#750
Nedre buken + Höft	#750	#850	#753
Nedre buken + Höft + Lår	#753	#853	#755
Nedre buken + Höft + Lår + Knä	#755	#855	#B855
Hela buken + Flank	#850	#85	#B85
Hela buken + Flank + Höft + Lår	#853	#B853	#855
Hela buken + Flank + Höft + Lår + Knä	#855	#B855	#855-H
Hela buken + Rygg + BH-linje	#B85	#B850-TCP	#BA85
Hela buken + Rygg + BH-linje + Höft + Lår	#B853	#853-H	#855-H
Hela buken + Rygg + BH-linje + Höft + Lår + Knä	#B855	#855-H	#BA855

BUKPLASTIK, LYFT och SKULPTURERING

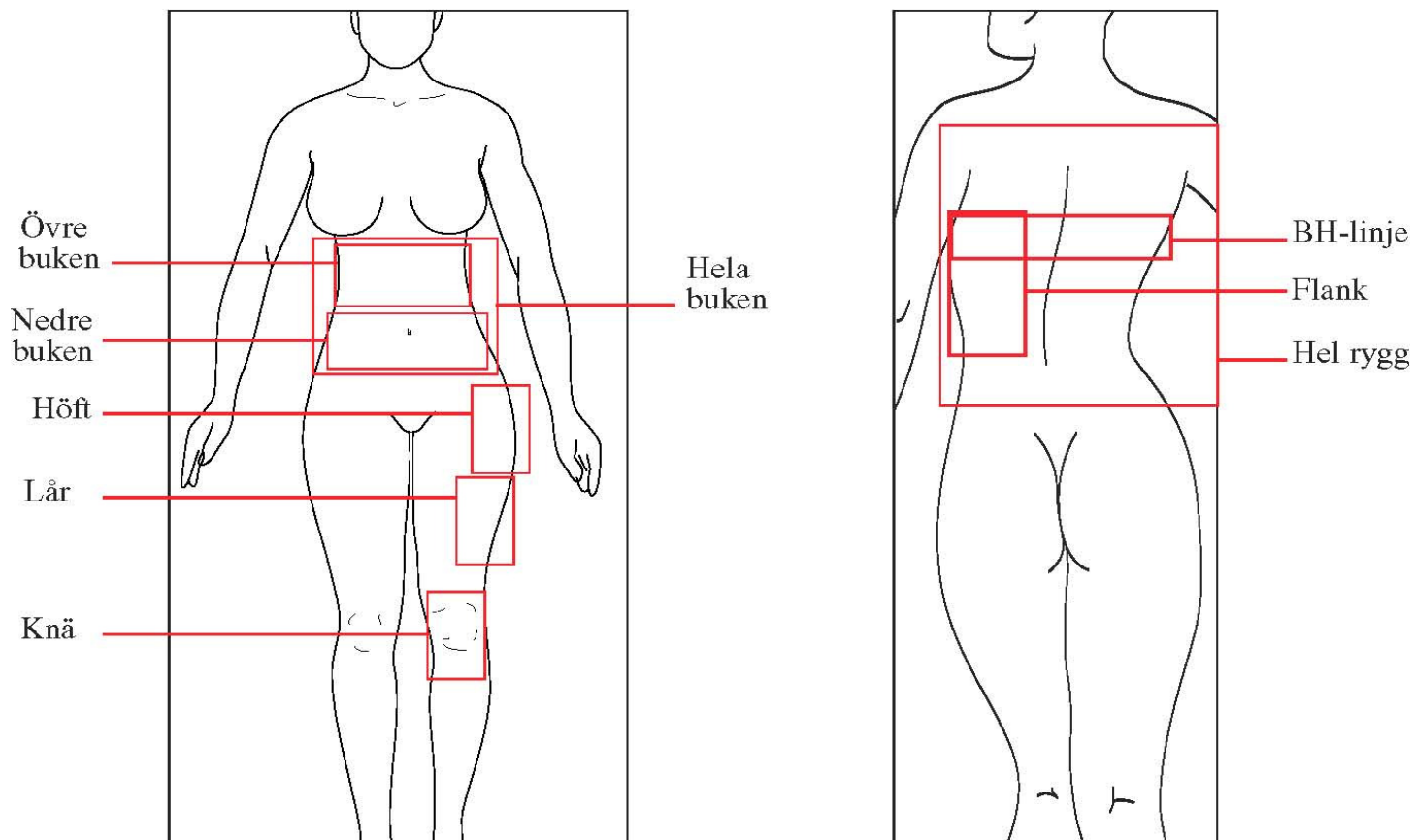


Område	1'a val	Alternativ	
Buk + Konturering, Flanker	#850	#B85	#350-9
Buk + Konturering, Flanker + Höft + Lår	#853	#B853	#855
Buk + Konturering, Flanker + Höft + Lår + Knä	#855	#B855	#855-H
Buk + Konturering, Rygg + BH-linje	#B85	#B853	#853-H
Buk + Konturering, Rygg + BH-linje + Höft + Lår	#B853	#B855	#855-H
Buk + Konturering, Rygg + BH-linje + Höft + Lår + Knä	#B855	#855-H	#BA855

BRÖST

Ingrepp	1'a val	Alternativ	
Förstoring	#454	#457-Z	#458-U
Mastopexi	#452	#454	#450
Förminskning	#450	#452	#465
Rekonstruktion	#450	#465	#457-Z
Sternumkompression (synmastia)	#455-V	#455-VN	

Önskat stöd	1'a val	Alternativ	
Minimalt	#458-U	#454-1	-
Medium	#454	#452	#458
Maximalt	#450	#452	-
Stabilisering av Implantat	#510-3	#510-X	#4510
Kompression	#457-Z	#465	#510-9

ARMAR, BRÖST + ARM

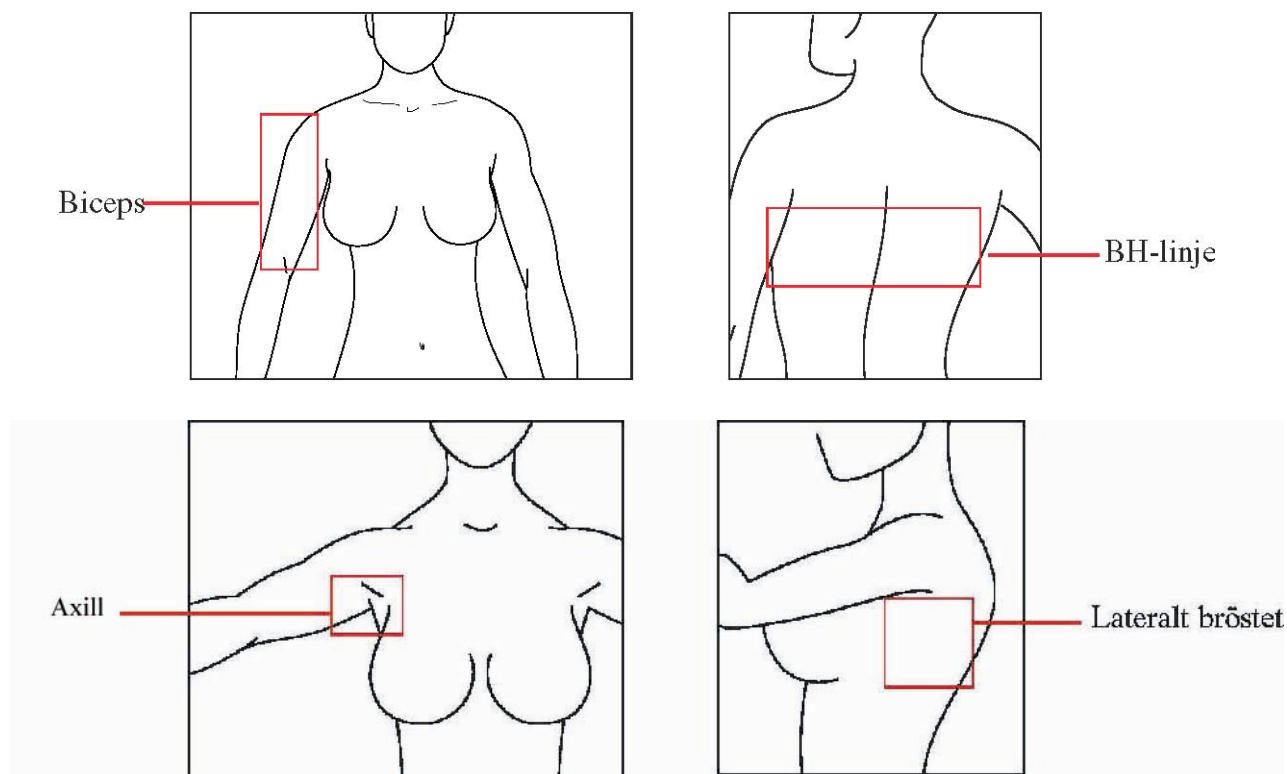

Ingrepp	!a val	Alternativ	
Fettsugning Biceps	#L933	#B943	#935
Fettsugning Biceps + Axill + Lateralt Bröstet	#BV930	#B943	#935
Fettsugning Biceps + Axill +Lateralt Bröst + BH-linje	#BV933	#BV930	#BA85
Brachioplasti	#BV933	#B943	#935
Brachioplasti + Brösförstoring//Mastopexi	#B943	#BV933	#BA85

MODELLERNAS ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Gäller alla plagg i 700, 1400, 800, 1600, Rubenesque och B-Serien

700/1400-serierna

Art: 75, 145, 750, 1450, 753, 1453, 755, 1455

Beskrivning: Gördlar med midjeresår: Mid-torso, underkropp

Kompressionsområden:

- Nedre buken
- Höft
- Lår
- Knä

Egenskaper:

- 5 eller 7,5 cm midjeresår
- Med dragkedja (700-serien) postoperativt
- Utan dragkedja (1400-serien) långtidsbruk
- 4 benlängder (utan ben, korta ben, över knäet, under vaden)

800/1600-serierna

Art: 85, 165, 850, 1650, 853, 1653, 853-H, 1653-H, 855, 1655, 855-H, 1655-H

Beskrivning: Gördlar med axelband: Full torso, underkropp

Kompressionsområden:

- Övre och nedre buken
- Flanker
- Höft
- Lår
- Knä

Egenskaper:

- Justerbara avtagbara axelband
- Med dragkedja (800-serien) postoperativt
- Utan dragkedja (1600-serien) långtidsbruk
- Hög rygg (800-H och 1600-H-serierna)
- 4 benlängder (utan ben, korta ben, över knäet, under vaden)

B-serien

Art: B85, B165, B 853, B1653, B855, B1655, BA85, BA853, BA855, B850-TCP

Beskrivning: Gördlar med BH: Full torso, rygg, flank och buk

Kompressionsområden:

- Övre och nedre buken
- Höft
- Lår
- Knä
- Rygg
- Arm
- Bröst

Egenskaper:

- Inbyggd mjuk bomulls-BH
- Dragkedja fram (B800-serien) postoperativt
- Utan dragkedja (B1600-serien) långtidsbruk
- Inbyggd BH och ärm (BA800-serien) postoperativt
- 4 benlängder (utan ben, korta ben, över knäet, under vaden)

Rubenesque gördlar

Art: R750, R754, R756, R850, R854, R856

Beskrivning: Gördlar för kvinnor med ”timglasfigur” – extra smal midja

Kompressionsområden:

- Övre och nedre buken
- Rygg
- Flank
- Höft
- Lår
- Knä

Egenskaper:

- Specialstorlek – smal midja, bredare höft
- Breda kompressionspaneler
- Dragkedja fram (R700-serien) postoperativt
- Dragkedja i sidan (R800-serien) postoperativt
- 3 benlängder (korta ben, över knäet, under vaden)





BENLÄNGD

Koppling till artikelnummer

Gäller alla plagg i 700, 1400, 800, 1600, Rubenensque och B-serien

Benlängden definieras i den sista siffran i artikelnumret. Detta gäller dock inte modellerna utan ben.)

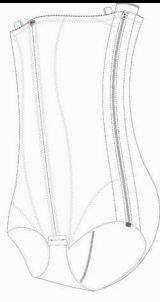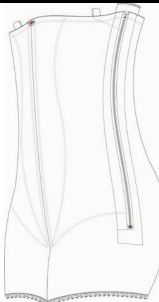
Exempel:

Benlängd	Utan ben	Korta ben	Knälånga ben (ovan knät)	Långa ben (nedanför vaden)
Slutsiffra	-	0	3	5
Exempel	 #85	 #850	 #853	 #855

ANSIKTE

Ingrepp	Alternativ		
	1'a val		
Ansiktslyftning	#210	#210-S	#210-N
Haka/hals	#210-U	#210-N	#210-S
Kind/haka (förstoring)	#210-2	#210	#210-S
Öronplastik	#210	#210-U	#210-2
Behandling med kyla/värme	#210-K	#210-K4	-
Pannlyft	#210-2	#210-OB	#210

HERR

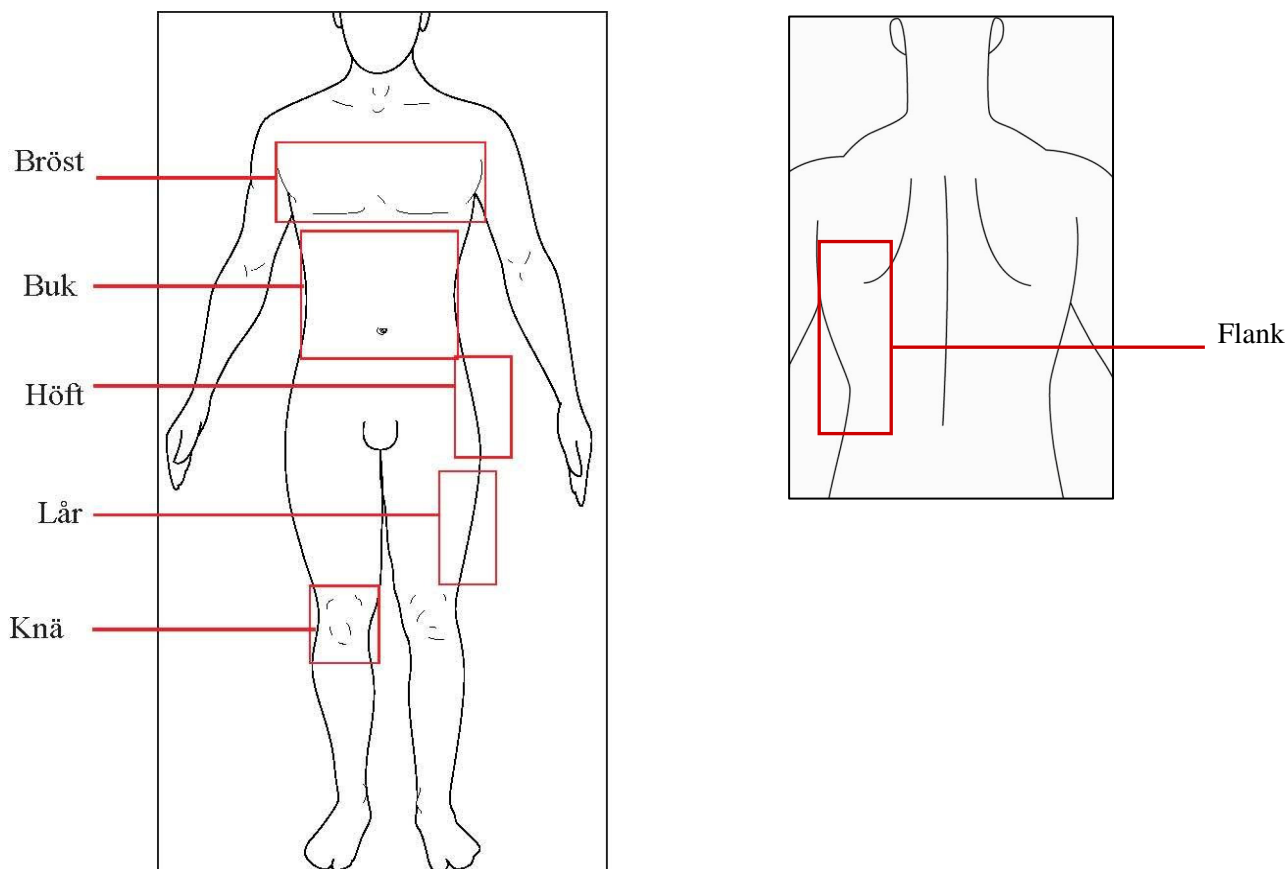

Ingrepp	1'a val	alternativ	
Fettsugning av bröst (gynecomasti)	#640	#642	#V840
Buk	#840	#743	#340-9
Bröst + Buk + Flank	#V840	#BS843	-
Bröst + Flank + Buk+ Höft + Lår	#BS843	-	-
Återhämtningperiod, efter ingrepp			
Fettsugning av bröst (gynecomasti)	#1240	#V1640	-
Buk	#1640	#V1640	-
Bröst + Buk+ Flank	#V1640	-	-